

Sanomed®

SANOMED 602

Stehenní bandáž



www.sanomed.cz



Návod k použití - stehenní bandáž - typ 602

Děkujeme, že jste si vybrali náš stehenní bandáž.

Tento návod vám jí pomůže správně používat a udržovat pro dosažení co nejlepších výsledků.

Informace o účelu použití

Bandáž 602 je navržena k cílené kompresi a podpoře stehenní svaloviny při sportovních aktivitách, při akutním či chronickém přetížení, pro zlepšení propriocepce a snížení bolesti při zátěži. Slouží jako podpůrná pomůcka, nenahrazuje odborné lékařské vyšetření nebo léčbu při závažných poraněních.

Kontraindikace a upozornění:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené nebo infikované rány či podrážděnou kůži.
- Nepoužívejte při známých kožních onemocněních bez konzultace s lékařem.
- Pokud při nošení pocítíte bolest, necitlivost, mravenčení nebo jiné nepříjemné příznaky, bandáž ihned sundejte a konzultujte stav s lékařem.
- Před dlouhodobým nebo léčebným použitím konzultujte použití s odborníkem (lékářem nebo fyzioterapeutem).
- Bandáž není určena pro celodenní nošení bez přestávek, doporučuje se střídavé používání.

Pokyny k nasazení / sundání:

Nasazení:

1. Zkontrolujte, zda je bandáž suchá a čistá.
2. Rozepněte suché zipy a přiložte na stehno tak, aby pokrývala oblast, kterou chcete podpořit.
3. Upravte polohu tak, horní okraj netlačil do rozkroku a spodní okraj byl nad kolenem.
4. Začnete zapínat spodní pásek a pokračujte směrem nahoru. Každý pásek utahujte rovnoměrně, aby bandáž seděla, ale nebyla příliš těsná.
5. Ujistěte se, že bandáž neklouže ani neomezuj krevní oběh.
6. Bandáž by měla pohodlně přiléhat ke stehnu a poskytovat potřebnou oporu.

Doporučení k nošení

- Doporučeno nosit na holém těle nebo přes tenké oblečení.
- Používejte pravidelně v rozumném režimu — bandáž podporuje stabilitu, není určena k trvalému, nepřetržitému nošení.

Sundání:

Uvolněte suché zipy a sundejte bandáž pás z nohy. Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Před praním zapněte všechny suché zipy.
- Perte ručně nebo v pračce v jemném pracím programu při 30 °C. Doporučujeme vložení bandáže do prací sítky.
- Používejte jemný prací prostředek; nepoužívejte bělidla, agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nežehlit, nesušit v sušičce, nevystavovat přímému zdroji tepla ani přímému slunečnímu záření.
- Sušte rozložené na rovnom povrchu, aby nedošlo k deformaci.
- Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě výrobku.

Skladování:

Skladujte na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční světlo. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
PA, PU, Elastan

Ozhašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.