

# Sanomed®

## **SANOMED 335** **Prstová ortéza**

Ortéza pro fixaci prstu



[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití – SANOMED 335

Děkujeme, že jste si vybrali naši prstovou ortézu. Tento návod vám jí pomůže správně používat.

## Informace o účelu použití:

Ortéza slouží k fixaci prstu v extenzi při zlomeninách, vyvrtnutí nebo jiných poraněních středního (PIP) a posledního (DIP) článku prstu ruky.

## Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Popis:

Rigidní dlahu (pevná konstrukce) zajišťuje úplnou fixaci PIP a DIP kloubu. Měkké vnitřní polstrování zvyšuje komfort při každodenním nošení.

Zapínání na suchý zip umožňuje jednoduché a rychlé přizpůsobení.

## Před použitím ortézy si přečtěte všechny

### bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poraďte se s lékařem.

## Pokyny k nasazení ortézy:

1. Před použitím si důkladně umyjte a osušte ruku.
2. Ujistěte se, že prst čistý a suchý.
3. Uvolněte suché zipy a otevřete ortézu.
4. Umístěte dlahu na postižený prst tak, aby podpírala střední a distální článek (PIP a DIP).
5. Zapněte pásky kolem prstu pomocí suchého zipu.
6. Zkontrolujte, že prst je v požadované poloze (lehce natažený), že nedochází k přílišnému tlaku na kůži nebo nehet.
7. Pokud je ortéza používána po zlomenině nebo chirurgickém zákroku, postupujte přesně podle pokynů ošetřujícího lékaře.

## Kontrola:

- Zkontrolujte, že prst je stabilizovaný a pohyb je omezen jen v potřebném rozsahu.
- Vyzkoušejte lehké pohyby ostatních prstů - neměly by být omezené.

## Upozornění:


- Používejte pouze podle pokynů lékaře.
- Nepřetahujte suchý zip – přílišné utažení může způsobit otlaky nebo poruchu prokrvení.
- Pravidelně kontrolujte stav pokožky pod ortézou. V případě zarudnutí nebo bolesti ortézu ihned sundejte a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte poškozenou nebo deformovanou ortézu.

## Údržba a čištění:

- Ortézu otřete vlhkým hadříkem s jemným mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.
- Nepoužívejte bělidla, aviváže ani chemické čističe.
- Neždímejte, nesušte v sušičce, nežehlit.
- Sušte volně na vzduchu, mimo přímé sluneční záření nebo zdroj tepla.

## Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

 <p>SANOMED, spol. s r. o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p><b>MD</b> Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: polyuretan, hliník, suchý zip</p>	<p><b>Ohlašovací povinnost:</b> Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
--	---	--