



SANOMED 703

Korektor vbočeného palce



Návod k použití - 703

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám pomůže bandáž správně používat.

Informace o účelu použití:

Korektor vbočeného palce je speciálně navržen pro noční nošení, aby vaše nohy mohly v klidu odpočívat a zároveň se účinně korigovat.

Indikace:

Hallux valgus, hallux rigidus, bursitis v oblasti MTTPH kloubu, po operaci hallux valgus, konzervativně-funkční terapie vadného postavení palce

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

1. Uvolněte suchý zip a palcový díl navlečte na palec.
2. Vedte elastický pásek kolem paty z vnitřní části chodidla a pásek vedte kolem nártu tak, aby pokračoval pod nárt a pod chodidlo a na vnější straně chodidla pásek pomoci suchého zipu zapněte.
3. Sílu korekce na palec si můžete regulovat dle potřeby (např. silnější tah pro výraznější efekt zvedání špičky).

Sundání:

- Rozepněte suché zipy a sejměte ortézu.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost ortézy.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Ortézu skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



 SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia	MD Medical Device (Zdravotnický prostředek) Materiálové složení: BA, PE	Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.
---	--	--